



PRVNÍ SPUŠTĚNÍ EMSZERO

Níže naleznete přepis školícího online kurzu pro přístroje EMSzero. Online kurz vám pomůže s prvním spuštěním přístroje a se správným zapojením rukojetí a uchycení hlavic pro bezproblémovou proceduru.



Přístroje EMSzero jsou velmi jednoduché na obsluhu, avšak méně zkušenému člověku mohou připadat složité. Proto je vypracování jednoduchého manuálu pro nás základní.

Po rozbalení krabic s přístrojem a příslušenstvím si vše pečlivě vyskládejte ven.

Přístroj postavte před sebe a zašroubujte držáky na rukojeti. Jsou dva způsoby. Budete mít při montáži rukojeti symetricky naproti sobě a nebo je budete mít dle stran obsluhy.

Po zašroubování držáků zapojte rukojeti do zadní části přístroje k určeným konektorům. Dbejte na to, aby byli rukojeti zapojeny vždy dvě stejné vedle sebe, nikoliv pod sebou!

Následně hlavice uložte do držáku na stroji, který jste před chvílkou přimontovali.


Následně pásem přiložte na ošetřovanou část a spustíte přístroj. Vyberete režim číslo 1. a postupně přidáváte intenzitu a radiofrekvenci, podle potřeby klienta.

SPRÁVNÉ NASAZENÍ:

Základem dobré procedury je správné nasazení. Každou hlavici pevně uchytíme na ošetřovanou část. Hlavice s rukojetí na vrchu používáme na břicho a hýždě. Ty upevňujeme větším popruhem. Hlavice na menší pás uchycujeme na stehna, lýtka a nebo ruce. Doporučená délka první procedury je 30 minut, počátek první procedury je 10% INTENSITY a 10% RF.



Procedura na břicho

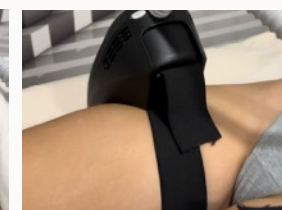

Procedura na stehna

SPRÁVNÉ ZAPOJENÍ:

Důležité při prvotním zapojení přístroje dbát manuálu. Zapojení přístroje je důležité pro správnou funkčnost. Dvě stejné rukojeti zapojujete vždy vedle sebe, nikoliv pod sebe. Uchycení rukojetí na přístroji je poté dle vlastního uvážení. Rukojeti jsou na přístrojové desce následně označeny jako A a B. Tím následně ovládáte jeden typ rukojetí a nebo druhý typ v závislosti na ošetřované partii.



Zapojení přístroje symetricky




Zapojení rukojetí do konektoru na zadní straně

SPRÁVNÉ SPUŠTĚNÍ:

Přístroj je velmi snadné ovládat. Po spuštění stroje pouze zvolíte režim číslo 1. a nastavíte hodnotu síly, kterou zákazník požaduje. V režimu číslo 1. se vše nastavuje automaticky a vy jako obsluha volíte pouze sílu stroje. Během procedury můžete snižovat a nebo zvyšovat sílu stroje a jeho radiofrekvenci. Režim číslo 2. je manuální a nedoporučuje se. V režimu číslo 2. nastavujete frekvenci jednotlivých kontrakcí, přicházíte tak o automatickou proměnu frekvencí, jako je u režimu číslo 1.



Po zapnutí přístroje výběr režimu

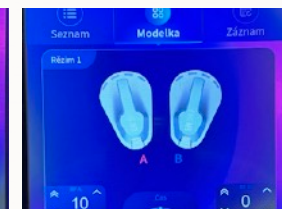

Základní nastavení síly procedury